


# GenTek® Werkzeug-Checkliste

## Certain® Verbindung


Encode® Emergence Gingivaformer  
Encode Gingivaformer  
Einteilige Gingivaformer

Zum Entfernen des Gingivaformers einen der folgenden Schraubendreher oder Schraubendreher-Winkelstücke einsetzen verwenden.

Alle Certain Gingivaformer verfügen über eine 1,20 mm Sechskantverankerung.

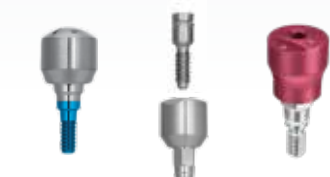

 Handschraubendreher

 Schraubendreher mit ISO-Winkelstück



Certain Encode Emergence Gingivaformer werden mit 20 Ncm Drehmoment angezogen.


GenTek Pre-Abutment Blanks und CEREC® Ti-Basen


Die GenTek Ti-Basen mit abgewinkelten Schraubenkanälen (ASC) nutzen **NEUE** Innensechsrund-Schraubendreher-Winkelstückeinsätze.



GenTek Scanbodies verfügen über eine 1,25 mm Sechskantverankerung. Die Certain GenTek Scanbodies werden handfest angezogen.




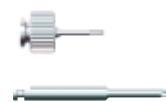
 Schraubendreher mit ISO-Winkelstück

 Innensechsrund-Schraubendreher



 Handschraubendreher

 Schraubendreher mit ISO-Winkelstück



Drehmomentschlüssel für Certain Verbindung: L-TIRW


Adapter: C9980

Ti-Basen und Pre-Abutment Blanks auf Implantatniveau werden angezogen mit 20 Ncm

Low-Profile Ti-Basis wird angezogen mit 10 Ncm



## Certain Schraubendreher

Verbindung	Schraubendreher Art	Kurz 17–21 mm (L)	Mittel 22–24 mm (L)	Lang 26–30 mm (L)	X-Lang 36 mm (L)
 1,20 mm (Sechskant)	Handschraubendreher	PHD02N	PHD03N	-	-
	Schraubendreher mit ISO-Winkelstück	-	RASH3N	RASH8N	-
-		IHX1.2D (mit GemLock®)	IXL1.2D (mit GemLock®)	-	
 Innensechsrund	Schraubendreher mit ISO-Winkelstück	ZFX02HLD21	-	ZFX02HLD28	ZFX02HLD36
 1,25 mm (Sechskant)	Handschraubendreher	HXGR1.25	-	HXLGR1.25	-
	Schraubendreher mit ISO-Winkelstück	-	HX1.25D	HXL1.25D	-




## TSV®/TSX®/2,9 mm NP Verbindung

Encode® Emergence Gingivaformer  
Encode Gingivaformer  
Einteilige Einheilkappen




Zum Entfernen des Gingivaformers einen der folgenden Schraubendreher oder Schraubendreher-Winkelstückeinsätze verwenden.

 Handschraubendreher 

 Schraubendreher mit ISO-Winkelstück





Alle TSV/TSX/2,9 mm NP Gingivaformer verfügen über eine 1,25 mm Sechskantverankerung. TSV/TSX Encode Emergence Gingivaformer werden mit 20 Ncm Drehmoment angezogen.

 TWR Schraubendreher





GenTek Pre-Abutment Blanks und CEREC Ti-Basen

 TWR Schraubendreher 



Die GenTek Ti-Basen mit abgewinkelten Schraubenkanälen (ASC) nutzen die **bestehenden** Innensechsrund-Schraubendreher-Winkelstückeinsätze.

 TWR Innensechsrund-Schraubendreher 



GenTek Scanbodies verfügen über eine 1,25 mm Sechskantverankerung. Die TSV/TSX GenTek Scanbodies werden handfest angezogen.



 Handschraubendreher 

 Schraubendreher mit ISO-Winkelstück 

Drehmomentschlüssel für TSV/TSX/2,9 mm NP Verbindung: TWR  
Ti-Basen und Pre-Abutment Blanks auf Implantatniveau werden angezogen mit 30 Ncm



## Schraubendreher für TSV/TSX/2,9 mm NP Verbindung

Verbindung	Schraubendreher Art	Kurz	Mittel	Lang
		17–21 mm (L)	22–24 mm (L)	26–30 mm (L)
 Innensechsrund	TWR Innensechsrund-Schraubendreher	-	TASCD24	TASCD30
 1,25 mm (Sechskant)	Handschraubendreher	HXGR1.25	-	HXLGR1.25
	Schraubendreher mit ISO-Winkelstück	-	HX1.25D	HXL1.25D
	TWR Schraubendreher	TW1.25	TW1.25L	-

## Weitere Informationen finden Sie unter [ZimVie.com](http://ZimVie.com)

**ZimVie US Corp LLC**  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Phone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272  
dentalCS@ZimVie.com

**ZimVie Germany GmbH**  
Kopernikusstraße 15  
DE-85221 Dachau  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11  
ZV.bestellung@ZimVie.com

**ZimVie Austria GmbH**  
Wienerbergstraße 11/12a  
A-1100 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18  
ZV.bestellung@ZimVie.com

**ZimVie Switzerland GmbH**  
Grüefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39  
ZV.bestellung@ZimVie.com

 **ZimVie**  
Restoring Daily Life.™

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen zugelassenen Handelspartnern vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanleitungen zu entnehmen. EU-Klassifizierung von Medizinprodukten: GenTek Scanbodies (I), GenTek Ti-Basen, Abutments und Schrauben (IIb), Zahnimplantate (IIb). Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie, nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden und ist nicht zur Weitergabe in Frankreich bestimmt. ZV2814 US EMEA ANZ DE REV A 10/25 ©2025 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

 0123 2797



Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.