

Die Encode® Emergence Gingivaformer

Restauratives Verfahren

Das Encode Abformsystem bietet optimierte Lösungen für Zahnärzte, da diese ohne Abformungen auf Implantatniveau behandeln können. Dadurch verkürzt sich der Behandlungsablauf für Chirurgen, Prothetiker und das Dentallabor. Darüber hinaus ermöglicht es Patienten eine bessere Erfahrung und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.

Verwenden Sie den Gingivaformer als Abformpfosten oder Scanbody: Durch eindeutige Codes auf der okklusalen Oberfläche des Encode Emergence Gingivaformers muss dieser nicht mehr gegen einen Abformpfosten oder einen Scanbody ausgetauscht werden.

Erhalt von Hart- und Weichgewebe: Der Verbleib des Gingivaformers anstelle eines Komponententauschs trägt dazu bei, das Gewebe zu erhalten, was ästhetische Ergebnisse ermöglicht.

Natürliche Austrittsprofile:

- Natürlichere Gewebeheilung mit allmählich ansteigenden Austrittsprofilen.
- Die Verringerung einer erforderlichen Knochenkonturierung wird unterstützt, von einem 1mm hohem zylindrischen Anteil des Gingivaformers, wenn das Implantat nicht tiefer als 1 mm subkrestal inseriert wurde.
- Mit unterschiedlichen Austrittsprofil-Durchmessern und in 3 Höhen erhältlich: 3 mm, 5 mm und 7 mm.

Rosafarbenes mattes Erscheinungsbild und klare Scans: Das rosafarbene matte Erscheinungsbild passt zur Farbe der Gingiva und sorgt so für ästhetische Ergebnisse nach der Operation. Die geringere intraorale Scanreflexion sorgt für klare Scanbilder.

Intuitive Codes: Eigens entwickeltes Code-Schema für einfachere Interpretation:

- Die Anzahl der Vertiefungen unterhalb der geraden Linie auf der okklusalen Oberfläche des Abutments kennzeichnet den Plattformdurchmesser.
- Die Anzahl der Vertiefungen auf der rechten Seite der okklusalen Abrundung des Abutments kennzeichnet die Höhe des Abutments.

Flexible Arbeitsabläufe: Nach der Abformung oder dem Scannen des Gingivaformers senden Sie den Fall an ein Labor Ihrer Wahl für eine finale CAD/CAM- oder Tibase-Abutment-Restauration.

Digitale Abformung mit dem Intraoralscanner



1 Entfernen Sie Fremdkörper von der okklusalen Oberfläche des Encode Emergence Gingivaformers.



2 Scannen Sie die Encode Emergence Gingivaformer mit einem Intraoralscanner gemäß den Anweisungen des Herstellers.



3 Prüfen Sie, ob der klare Scan alle okklusalen Oberflächenmarkierungen des/der Encode Gingivaformer(s), alle Weichgewebekonturen und den gesamten Umfang des Gingivaformers erfasst hat.




4 Scannen Sie den Gegenkiefer und die Bissregistrierung.

5 Senden Sie den Scan an Ihr Labor.

Encode Emergence Gingivaformer – Restauratives Verfahren

Herkömmliche Abformung

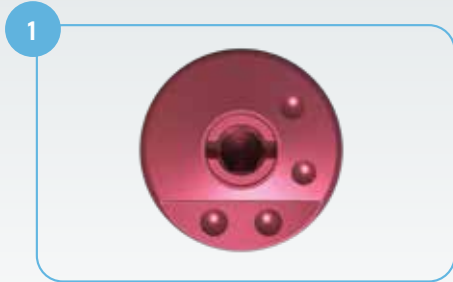

1 Entfernen Sie Fremdkörper von der okklusalen Oberfläche des Encode Emergence Gingivaformers.



2 Applizieren Sie ein dünnfließendes Abformmaterial um die Gingivaformer und bringen Sie ein Abformmaterial mit einer mittleren Konsistenz (Polyäther oder Polysyloxan) in den Abformlöffel ein, um mit der Abformung zu beginnen.



3 Nehmen Sie nach dem Aushärten des Abformmaterials den Abformlöffel aus dem Mund. Prüfen Sie, dass eine klare Abformung (keine Risse, Einrisse, Blasen oder Verformungen) der gesamten okklusalen Oberflächenmarkierungen des Encode Emergence Gingivaformers gemacht und der gesamte Umfang des Gingivaformers und der Weichgewebekonturen erfasst wurde.



4 Nehmen Sie eine Abformung des Gegenkiefers und eine Bissregistrierung vor.

5 Wählen Sie eine Farbnuance für die Krone. Desinfizieren Sie die Abformungen und packen Sie sie ein; senden Sie sie für das endgültige Abutment-Design an Ihr Labor.

Für weitere Informationen zu Encode Gingivaformern kontaktieren Sie uns unter ZV.bestellung@ZimVie.com oder besuchen Sie ZimVie.com/dental

ZimVie Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Austria GmbH
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.Bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.Bestellung@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.™

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. oder einem verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc. etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZVINST0006DE REV B 03/23 ©2023 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

 2797

