

כיפות הריפוי Encode® Emergence

הליך שחזור

המערכת Encode Impression System מספקת פתרונות אופטימליים לרופאים על ידי ביטול הצורך יציקות לשתלים, מה שמייעל את תהליך הטיפול עבור המנתח, הקלינאי המשקם והמעבדה הדנטלית. בנוסף, המטופלים נהנים מחוויה טובה יותר ומתוצאה אסתטית יפהפיה.

ניתן להשתמש בכיפת הריפוי בתור טרנספר או גוף סריקה: קודים ייחודיים במשטח הסגרי של כיפת הריפוי Encode Emergence מונעים את הצורך בהחלפתה בכיפת מטבע או בגוף סריקה.

שימור הרקמות הקשות והרכות: שמירת כיפת הריפוי במקום החלפת המרכיבים משמרת את הרקמות, דבר שמוביל לתוצאות אסתטיות.

פרופילי התרחבות טבעיים:

- ריפוי רקמות טבעי יותר הודות לפרופילי התרחבות שגדלים בהדרגה.
 - הפחתת הצורך בעיצוב פרופיל העצם בעת מיקום שתל בעומק של מ"מ אחד לכל היותר מתחת לרכס העצם, בתמיכת צילינדר ישר בגובה מ"מ אחד מפלטפורמת השתל.
 - זמינות במגוון קטרים של התרחבות ובשלושה גבהים: 3 מ"מ, 5 מ"מ ו-7 מ"מ.
- מראה מט ורוד אסתטי מאפשר סריקות ברורות:** מראה המט הוורוד דומה מאוד לצבע החניכיים כך שהוא מאפשר לקבל תוצאות אסתטיות לאחר הניתוח ומפחית את ההשתקפות בעת הסריקה בתוך הפה לקבלת תמונות סריקה ברורות.
- קודים אינטואיטיביים:** תוכנית הקודים מיועדת לאפשר פירוש קל יותר:
- מספר הגומות מתחת לקו הישר בסגר המבנה מציין את קוטר הפלטפורמה.
 - מספר הגומות מימין לכיפת סגר המבנה מציין את גובה המבנה.

תהליכי עבודה גמישים: לאחר לקיחת המידה או הסריקה של כיפת הריפוי, ניתן לשלוח את המקרה למעבדה לבחירתך לצורך CAM/CAD סופי או לשחזור מבנה Tibase.

מטבע דיגיטלי וסורק לחלל הפה הפה



2 יש לסרוק את כיפות הריפוי Encode Emergence באמצעות סורק לפני הפה על פי הוראות היצרן.



1 יש לנקות משאריות את המשטח הסגרי של כיפת הריפוי Encode Emergence.



4 יש לסרוק את הקשת הנגדית ואת רישום המנשך.



3 יש לוודא שהסריקה מתעדת את המשטח הסגרי המקודד של כל כיפות הריפוי Encode Emergence, את כל קווי המתאר של הרקמות הרכות ואת כל ההיקף של כיפות הריפוי.

5 יש לשלוח את הסריקה למעבדה.

כיפות הריפוי Encode Emergence – הליך שחזור

מטבעים מסורתיים



יש להשתמש בחומר מטבע בעל משקל גוף קל סביב כיפות הריפוי ובחומר מטבע אלסטומרי בעל משקל גוף בינוני (פוליאתר או פוליוויניל) בכף המטבע ולהניח אותם בפה.



יש לנקות משאריות את המשטח הסגרי של כיפת הריפוי Encode Emergence.



יש ליצור מטבע של הקשת הנגדית ושל רישום המנשך.



לאחר שחומר המטבע מקובע, יש להוציא את הכף מהפה. יש לוודא שנוצר מטבע נקי (ללא קרעים, חורים, בועות או עיוותים) של המשטח הסגרי המקודד של כל כיפות הריפוי Encode Emergence, ושנוצרה הטבעה של כל ההיקף של כיפות הריפוי וקווי המתאר של הרקמות הרכות.

יש לבחור גוון לכתר. יש לחטא ולארוז את המטבעים ולשלוח אותם למעבדה לעיצוב סופי של הכיפה.

לקבלת מידע נוסף על כיפות הריפוי של Encode, ניתן לפנות אלינו במספר **+972 3 612 424** או לבקר בכתובת ZimVie.com/dental

ZimVie
Restoring Daily Life.™

Zimmer Dental Ltd
העמל 13
פארק תעשייה אפק
ראש העין
ישראל
טל': +972 3 612 4242
פקס: +972 3 612 4243
zvil-cs@ZimVie.com

ZimVie Dental
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
טלפון: +1-561-776-6700
פקס: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

