

De Encode® Emergence Healing Abutments

Restauratieve procedure

Het Encode Impression System biedt artsen geoptimaliseerde oplossingen door afdrucken op implantaatniveau overbodig te maken. Hierdoor wordt het behandelproces gestroomlijnd voor de chirurg, de restauratief tandarts en het laboratorium. Daarnaast is het een prettiger proces voor de patiënten en leidt het tot een mooi esthetisch resultaat.

Gebruik het healing abutment als een afdrukstift of scanbody: unieke codes op het occlusale oppervlak van het Encode Emergence Healing Abutment maken het verwisselen met een afdrukstift of een scanlichaam overbodig.

Behoud van hard en zacht weefsel: het behouden van het healing abutment in plaats van het verwisselen van componenten helpt het weefsel te behouden, wat leidt tot esthetische resultaten.

Natuurlijke uitlooppromen:

- Meer natuurlijke genezing van weefsel met geleidelijk oplopende uitlooppromen.
- De botprofilering wordt beperkt wanneer een implantaat niet dieper dan 1 mm onder de botkam wordt geplaatst, ondersteund door een rechte cilinder van 1 mm van het implantaatplatform.
- Verkrijgbaar in diverse uitlooppromediameters en in drie hoogtes: 3, 5 en 7 mm.

Matroze uiterlijk voor esthetiek en heldere scans: het matroze uiterlijk komt nauw overeen met de kleur van de gingiva voor esthetische resultaten na de operatie en vermindert intraorale scanreflectie voor duidelijke scanbeelden.

Intuïtieve codes: codeschema ontworpen voor eenvoudigere interpretatie:

- Het aantal kuiltjes onder de rechte lijn op het occlusale abutment geeft de diameter van het platform aan.
- Het aantal kuiltjes aan de rechterkant van de occlusale koepel van het abutment geeft de hoogte van het abutment aan.

Flexibele workflows: na het maken van de afdruk of het scannen van het healing abutment dient u de casus in bij een laboratorium van uw voorkeur voor een definitieve CAD/CAM- of Tibase-abutmentrestauratie.

Digitale afdruk met een intraorale scanner



1 Verwijder vuil van het occlusale oppervlak van het Encode Emergence Healing Abutment.



2 Scan de Encode Emergence Healing Abutments met een intraorale scanner volgens de instructies van de fabrikant.



3 Controleer of een duidelijke scan het gehele gecodeerde occlusale oppervlak van het Encode Emergence Healing Abutment, alle contouren van het zachte weefsel en de volledige omtrek van het healing abutment heeft vastgelegd.




4 Scan de tegenoverliggende boog en bijregistratie.

5 Stuur de scan naar uw laboratorium.

Encode Emergence Healing Abutments - Restauratieve procedure

Traditionele afdruk

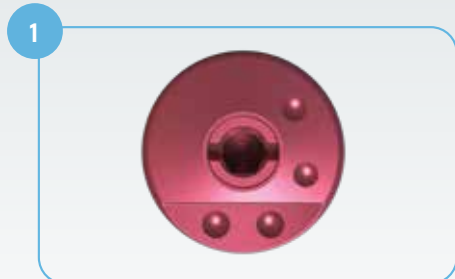

1 Verwijder vuil van het occlusale oppervlak van het Encode Emergence Healing Abutment.



2 Gebruik een licht body-afdruk materiaal rondom de healing abutments en een medium body-afdruk materiaal van elastomeer (polyether of polyvinyl) in de afdruktray en plaats deze in de mond.



3 Neem de afdruktray uit de mond nadat het afdruk materiaal zich heeft gezet. Controleer of er een duidelijke afdruk (geen scheuren, gaten, luchtballen of vervormingen) is gemaakt van het gehele gecodeerde occlusale oppervlak van het Encode Emergence Healing Abutment en de volledige omtrek van het healing abutment en de contouren van het zachte weefsel zijn vastgelegd.



4 Maak een afdruk van de tegenoverliggende kaakboog en bijregistratie.

5

Selecteer een tint voor de kroon. Desinfecteer en verpak de afdrukken en stuur deze naar uw laboratorium voor het definitieve ontwerp van het abutment.

Neem voor meer informatie over Encode Healing Abutments contact met ons op via ZV.BeNeLuxOrders@ZimVie.com of ga naar ZimVie.com/dental

ZimVie Dental Global
Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Belgium N.V.
Building MC Square
Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen, Belgium
Phone: 0800 503 11
ZV.BeNeLuxOrders@ZimVie.com

Biomet 3i Netherlands BV
Marten Meesweg 25-G
Rotterdam 3068AV
Netherlands
Phone: 078 62 92 800
ZV.BeNeLuxOrders@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.™

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten waarnaar in dit document wordt verwezen eigendom van ZimVie Inc. of een gelieerde onderneming. Alle producten worden geproduceerd door een of meer tandheelkundige dochterondernemingen van ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) en worden verkocht en gedistribueerd door ZimVie Dental en zijn geautoriseerde marketingpartners. Raadpleeg het etiket of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en beschikbaarheid van producten kunnen gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZimVie. ZVINST0006NL REV B 03/23 ©2023 ZimVie. Alle rechten voorbehouden.

CE
2797

